

Lisäys käyttöohjeeseen:

KONKKAMIKROFONILLA VARUSTETTU KORVAKÄYTÄVÄKOJE



RMT

Kojeeni malli: _____

Paristokoko: 10 312 Vahasuoja: _____

Sarjanumero vasen: _____

Sarjanumero oikea: _____

YHTEYSTIEDOT

GN ReSound Finland Oy/Ab

Koronakatu 1 B

02210 ESPOO

Puh: (09) 4777 9700

Faksi: (09) 4777 9777

www.danalink.fi

Sähköposti: danalink@danalink.fi

Kojeeseen tilattavat tarvikkeet ja varaosat:

Paristot

Vahasuoja

Mikrofonisuoja

Konkkamikrofonikojeen asettaminen korvaan

Toimi näin:

1. Pidä koje peukalon ja etusormen välissä.
2. Aseta korvakappale korvakäytävään niin että mikrofoni ja mikrofoniiletku osoittavat korvasta ulospäin. Koje asettuu paikalleen korvakäytävään kevyesti painamalla ja samanaikaisesti kääntämällä.
3. Kojeen asettaminen voi helpottua, jos otat toisella kädellä korvanlehdessä ja venytät korvaa hieman asettamisen aikana. Myös suun aukaiseminen ja sulkeminen voi helpottaakojeen asettamista korvaan.
4. Aseta mikrofoni varovasti korvakäytävän yläpuolella olevaan rustotaipeseen. Aseta myös mikrofoniiletku paikoilleen korvakuoppaa myötäillen.

Kuulokojeen tulisi istua korvassa napakasti mutta mukavasti. Kuulokoje saattaa vinkua, mikäli sitä ei ole asetettu oikein korvaan. Aseta koje uudelleen niin, että se tuntuu hyvältä, jolloin myös vinkuminen loppuu. Mikäli koje edelleen vinkuu, tai jos korva ärsyyntyy, ota yhteys kuuloasemaan. Älä koskaan yritä itse työstää kuorikkoa.

Konkkamikrofonikojeen poistaminen korvasta

Toimi näin:

1. Ota vetosiimasta tai mikrofoniiletkusta kiinni peukalolla ja etusormella.
2. Koje tulee pois korvasta kevyesti vetämällä ja samalla kääntämällä. Älä koskaan vedä tilanneohjelmavalitsimesta tai paristokotelosta, sillä ne voivat vahingoittua.

Mikrofonissa on suoja joka välillä pitää vaihtaa. Ota yhteys kuuloasemaasi jos kojeen ääni vaimenee.

